

## Dopasowanie soczewek aquity krok po kroku

1

Przekształcenie mocy korekcji okularowej na korekcję soczewkami kontaktowymi

2

Jeśli wartość mocy korekcji soczewkami jest w zakresie  $+6.00$  do  $-8.00$  D,  $Cyl \leq 0.75$  D

aquity A

3

3. Jeśli wartość mocy korekcji soczewkami jest w zakresie  $0.0$  do  $-6.00$  D i  $Cyl$   $0.75$  do  $1.50$ D, należy wybrać z:

$170^\circ$  do  $10^\circ$

aquity H

$10^\circ$  do  $30^\circ$

aquity H+

$80^\circ$  do  $100^\circ$

aquity V

$150^\circ$  do  $170^\circ$

aquity H-

