


Menicon Z

Budowa asferyczna przedniej i tylnej części soczewki

Materiał Menicon Z

Dk / t_c : 125×10^{-9} (ISO) (t_c : 0,13 mm dla -3,00 D)

Średnica zmiana BC co 0,10 mm	9.00	9.20	9.40	9.60	9.80
7,20	[Diagram showing step change in BC]				
7,30 ~ 7,50	[Diagram showing step change in BC]				
7,60 ~ 7,80	[Diagram showing step change in BC]				
7,90 ~ 8,10	[Diagram showing step change in BC]				
8,20 ~ 8,60	[Diagram showing step change in BC]				

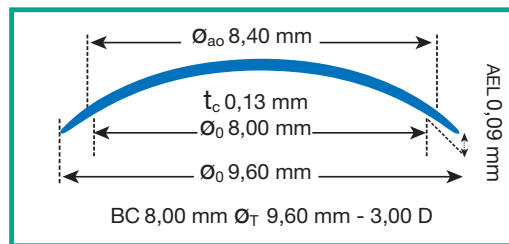

Zakres dostępnych parametrów

Parametry*	BC (mm)	Moc sferyczna (D)	Średnica (mm)
min. / maks.	6,50 do 9,00	- 25,00 do + 25,00	Średnica wybierana dowolnie w zakresie od 9,00 do 9,80
Standardowo	7,20 do 8,40	+ 5,00 do - 10,00	Średnica jest uzależniona od BC
Zmiana co	0,10	0,25	0,20

* Inne parametry mogą być dostępne na zamówienie.

Zasady dobierania soczewek

\varnothing_T	$K-K' < 0,20$ mm	$0,20$ mm $\leq K-K' \leq 0,40$ mm	$0,40$ mm $\leq K-K' \leq 0,50$ mm
Średnica od 9,00 do 9,80, w zależności od promienia	BC = K + 0,10	BC = K	BC = K - 0,10

K – najbardziej płaski promień rogówki K' – najbardziej stromy promień rogówki BC – promień krzywizny bazowej soczewki

Wskazania

- **Sztywne soczewki gazoprzepuszczalne o bardzo wysokim DK do korekcji miopii, hipermetropii i astygmatyzmu rogówkowego.**
- **Zalecane zastosowanie:**
 - u dzieci i nastolatków
 - w przypadkach nietolerancji soczewek miękkich
 - przy wysokiej ametropii
 - nieregularny kształt rogówki
 - zaburzenia filmu łzowego
 - astygmatyzm rogówkowy
 - noszenie w trybie ciągłym (do 30 dni)
- **Wymiana soczewek jest zalecana nie rzadziej niż co 2 lata.**
- **Noszenie dzienne lub w trybie ciągłym do 30 dni.**

Pielęgnacja soczewek

- **MeniCare Pure:** preparat do codziennej pielęgnacji.
- **Progent:** cotygodniowe intensywne czyszczenie (usuwanie białek) i dezynfekcja.



CE 0483 Manufactured by Menicon B.V.



Aktualizacja dokonana przez dystrybutora: 10/2020

ME 009/6 2010-10

Dystrybutor: **AQUA-LENS®**
SZYMANEK S.C.

ul. Taborowa 18, 02-699 Warszawa, tel./fax: 22 831 32 40, aqualens@soczewki.biz, www.soczewki.biz