



DOBIERANIE SOCZEWEK DLA PACJENTÓW Z ASTYGMATYZMEM



$K - K' \leq 0,40 \text{ mm}$
(astygmatyzm rogówkowy $\leq 2,00 \text{ D}$)

Astygmatyzm
indukowany
 $< 1,00 \text{ D}$

Menicon EX-Z
Menicon Z- α
Menicon Z } $\varnothing_T 9,60 \text{ mm}$

Astygmatyzm
indukowany
 $\geq 1,00 \text{ D}$

Menicon Z FT

$K - K' > 0,40 \text{ mm}$
(astygmatyzm rogówkowy $> 2,00 \text{ D}$)

Astygmatyzm
indukowany
 $< 1,00 \text{ D}$

Menicon EX-Z lub Z- α
 $\varnothing_T 8,80 / \varnothing_T 9,20 \text{ mm}$

Menicon Z BTC

Astygmatyzm
indukowany
 $\geq 1,00 \text{ D}$

Menicon Z BT

Dostępne w wersjach Z Progressive i Z Progressive + dla pacjentów z presybią.

Z Comfort BTC and BT

Dla poprawy komfortu
i lepszego wyśrodkowania
soczewki, przy barwianiu
na godzinie 3 i 9.

$K - K' \leq 0,30 \text{ mm}$
(astygmatyzm rogówkowy $\leq 1,50 \text{ D}$)

Astygmatyzm
indukowany
 $< 1,00 \text{ D}$

Menicon Z Comfort

$K - K' > 0,30 \text{ mm}$
(Astygmatyzm rogówkowy $> 1,50 \text{ D}$)

Astygmatyzm
indukowany
 $< 1,00 \text{ D}$

Menicon Z Comfort BTC

Astygmatyzm
indukowany
 $\geq 1,00 \text{ D}$

Menicon Z Comfort BT

AQUA·LENS®
SZYMANEK S.C.

tel. 22 831 32 40
aqualens@soczewki.biz, www.soczewki.biz

Menicon

Wzory soczewek Menicon z materiału Z	Zasady dobierania soczewek	Zakres dostępnych parametrów
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------


F_v: -25.00 do +25.00 D co 0,25 D

SFERYCZNE

Menicon EX-Z	sferyczno-asferyczne	$0,20 \text{ mm} \leq K-K' \leq 0,40 \text{ mm}$ $K-K' \geq 0,45 \text{ mm}$	$\varnothing_T: 9,60 \text{ BC} = K$ $\varnothing_T: 8,80 \text{ BC} = \text{średnie } K + 0,10 \text{ mm}$	$\varnothing_T: 8,80 / 9,20 / 9,60 \text{ mm}$ $\text{BC: } 6,50 \text{ do } 9,00 \text{ mm co } 0,05 \text{ mm}$
Menicon Z-α	sferyczno-asferyczne	$0,20 \text{ mm} \leq K-K' \leq 0,40 \text{ mm}$ $K-K' \geq 0,45 \text{ mm}$	$\varnothing_T: 9,60 \text{ BC} = K + 0,10 \text{ mm}$ $\varnothing_T: 8,80 \text{ BC} = \text{średnie } K + 0,20 \text{ mm}$	
Menicon Z	asferyczne	$0,20 \text{ mm} \leq K-K' \leq 0,40 \text{ mm}$	$\text{BC} = K$	$\varnothing_T: 9,00 \text{ do } 9,80 \text{ mm co } 0,20 \text{ mm}$ $\text{BC: } 7,20 \text{ do } 8,60 \text{ mm co } 0,10 \text{ mm}$
Menicon Z Comfort	dużej średnicy	$K-K' \leq 0,30 \text{ mm}$	$\text{BC} = K$	$\varnothing_T: 10,20 / 10,60 / 11,00 \text{ mm}$ $\text{BC: } 6,50 \text{ do } 9,00 \text{ mm co } 0,05 \text{ mm}$

PRZEDNIO-TORYCZNE

Menicon Z FT

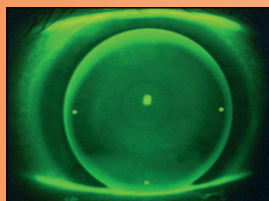

3 znaczniki: 0°, 180° i 270°

$K - K' < 0,20 \text{ mm}$ $\text{BC} = K + 0,05 \text{ mm}$
 $0,20 \text{ mm} \leq K - K' \leq 0,40 \text{ mm}$ $\text{BC} = K$
 $\varnothing_T = 9,60 \text{ mm}$


$\varnothing_T: 9,10 / 9,60 / 10,10 \text{ mm}$
 $\text{BC: } 6,50 \text{ do } 9,00 \text{ mm co } 0,05 \text{ mm}$
 Cylinder przedni (D): -0,75 do -2,00 D co 0,25D
 Oś cylindra przedniego: 0 do 180° co 1°
 Balast pryzmatyczny: 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50

TYLNO-TORYCZNE skompensowane

Menicon Z BTC

$\varnothing_T: 9,10 / 9,60 / 10,10 \text{ mm}$
 $\text{BC: } 7,00 \text{ do } 9,00 \text{ mm co } 0,05 \text{ mm}$
 Cylinder tylny: 0,20 do 1,50 mm co 0,05 mm

Menicon Z Comfort BTC

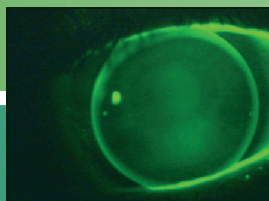

Najbardziej płaska oś południkowa jest oznaczona dwoma znacznikami – kropkami (niekoniecznie musi znajdować się na południku horyzontalnym),

Najbardziej płaska $\text{BC} = K$

Najbardziej stroma $\text{BC} = K' + 0,15 \text{ mm}$

$\varnothing_T: 10,20 / 10,60 / 11,00 \text{ mm}$
 $\text{BC: } 6,50 \text{ do } 9,00 \text{ mm co } 0,05 \text{ mm}$
 Cylinder tylny: 0,20 do 1,00 mm co 0,05 mm

BI-TORYCZNE

Menicon Z BT

$\varnothing_T: 9,10 / 9,60 / 10,10 \text{ mm} - \text{BC: } 7,00 \text{ do } 9,00 \text{ mm}$
 Cylinder tylny: 0,20 do 1,00 mm co 0,05 mm
 Cylinder przedni (D): -0,50 do -2,00 D co 0,25 D
 Oś cylindra przedniego: 0 do 180° co 1°

Menicon Z Comfort BT

$\varnothing_T: 10,20 / 10,60 / 11,00 \text{ mm} - \text{BC: } 6,50 \text{ do } 9,00 \text{ mm}$
 Cylinder tylny: 0,20 do 1,00 mm co 0,05 mm
 Cylinder przedni (D): -0,50 do -2,00 D co 0,25 D
 Oś cylindra przedniego: 0 do 180° co 1°