




Wszystko, co należy wiedzieć o ortokeratologii

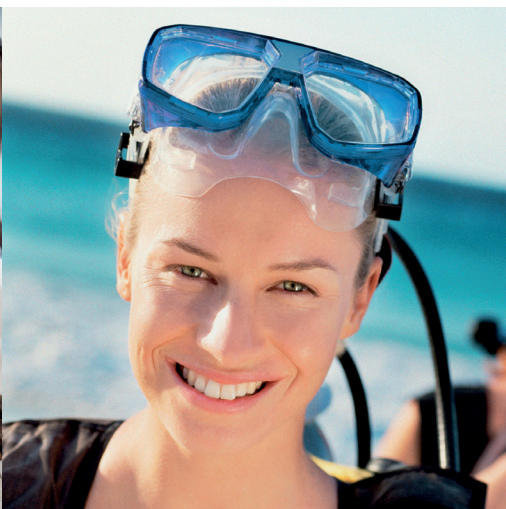

Korekcja krótkowzroczności
podczas snu i **wyraźne widzenie**
przez cały dzień, bez noszenia
okularów czy soczewek kontaktowych
oraz **kontrola krótkowzroczności**



Podstawowa zasada

Zakładane na noc soczewki Menicon Z Night zmieniają ukształtowanie rogówki podczas snu.

Geometria soczewek została skonstruowana tak, aby stopniowo spłaszczać centralną część rogówki, zapewniając korekcję krótkowzroczności i/lub astygmatyzmu.

Soczewki należy zdejmować rano po przebudzeniu.

W ciągu dnia nie ma konieczności noszenia soczewek kontaktowych ani okularów, ponieważ soczewki ortokorekcyjne zakłada się na noc.

Po przerwaniu stosowania soczewek Menicon Z Night, efekt ortokorekcji jest odwracalny.

Kto może skorzystać z tej metody?

Soczewki Menicon Z Night są zasadniczo przeznaczone dla osób z astygmatyzmem (do -2,5 dioptrii) i krótkowzrocznych (do -4 dioptrii) oraz osób, które nie chcą nosić okularów ani soczewek kontaktowych w ciągu dnia.

Opisywana nowoczesna metoda korekcji jest zalecana w następujących przypadkach:

- dla dzieci z postępującą krótkowzrocznością – badania potwierdzają korzystny dodatkowy efekt ortokorekcji, tj. spowolnienie postępu krótkowzroczności,
- dla osób uprawiających sporty,
- dla niektórych grup zawodowych: strażaków, fryzjerów, pracowników branży budowlanej, itp.
- w przypadku nietolerancji soczewek kontaktowych,
- w przypadku „łagodnego” zespołu suchego oka,
- jako alternatywa dla chirurgii refrakcyjnej.



Motywacja

- Ortokorekcja pozwala widzieć wyraźnie w każdych warunkach, bez konieczności noszenia okularów lub soczewek kontaktowych w ciągu dnia, szczególnie rano, podczas uprawiania sportów, wypoczynku, w szkole i w pracy...
- pozwala ograniczać skutki alergii, problemy z suchością oczu i pyłem w powietrzu,
- odwracalna i pewna alternatywa dla chirurgii refrakcyjnej,
- badania wykazały korzystny efekt stosowania ortokorekcji tzn. spowolnienie progresji krótkowzroczności.

Wskazówki

- Pacjent powinien zakładać soczewki wyłącznie na noc i zdejmować je rano.
- Istotne jest zakładanie soczewek co noc (regularnie na co najmniej 6 godzin).
- Już po 2 lub 3 nocach stosowania soczewek Menicon Z Night, większość użytkowników uzyskuje dobrą jakość widzenia bez okularów lub soczewek kontaktowych, a po tygodniu osiąga optymalny wynik korekcji.
- Soczewki Menicon Z Night są wykonane z materiału Menicon Z o bardzo wysokiej przepuszczalności tlenowej zapewniającej dopływ bardzo dużej ilości tlenu do rogówki.
- Menicon zaleca czyszczenie, przepłukiwanie i dezynfekowanie soczewek Menicon Z Night roztworem uniwersalnym MENICARE PURE co rano po zdjęciu soczewek oraz intensywne oczyszczanie preparatem Menicon Progent raz w tygodniu. Pozwala to uzyskać optymalny komfort noszenia i kontynuować stosowanie soczewek Menicon Z Night co noc.
- Soczewki Menicon Z Night wymagają wymiany raz na rok.



Od czego zacząć

- Należy zgłosić się do specjalistycznego ośrodka, w którym dokonuje się aplikacji soczewek ortokeratologicznych Menicon Z Night.
- Na podstawie szczegółowych badań i pomiarów oka zamawiane są indywidualnie zaprojektowane soczewki Menicon Z Night.
- W dniu odbioru soczewek specjalista dokładnie wyjaśni zasady zakładania, zdejmowania i pielęgnacji soczewek Menicon Z Night oraz określi harmonogram wizyt kontrolnych.
- Istotne znaczenie mają wizyty kontrolne (bez założonych soczewek) przeprowadzane po 2 i 6 miesiącach stosowania, a następnie co roku, ponieważ pozwalają sprawdzić, czy soczewki są tolerowane przez rogówkę. Na każdą wizytę kontrolną należy zabrać ze sobą soczewki.
- Specjalista ustala indywidualnie dla każdego pacjenta tryb wizyt kontrolnych, dostosowując do specyficznych potrzeb pacjenta.

Dane kontaktowe specjalisty:

CE 0344 Menicon Z Night jest produkowany przez Menicon B.V. (CE0344), MENICARE PURE produkowany przez Menicon Co., Ltd. oraz MeniCare Plus i Menicon Progent produkowane przez Menicon Pharma SAS (CE0483) są wyrobami medycznymi. Przed zastosowaniem każdego z produktów, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania.

Aktualizacja dokonana przez dystrybutora: 10/2020