



DMV 45™



DO SZTYWNYCH I GAZOPRZEPUSZCZALNYCH SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

ZDEJMOWANIE – Zwiłżyć miseczkę przyssawki DMV 45 i zbliżyć ją do powierzchni oka. Należy upewnić się, że soczewka jest ustawiona centralnie na powierzchni oka. Ustawić przyssawkę bezpośrednio nad powierzchnią soczewki i przyłożyć ją do środkowej części, patrząc w lustro. Zdjąć soczewkę z powierzchni oka ruchem odciągającym. Po zdjęciu soczewki, należy ostrożnie zsunąć ją z przyssawki, przesuwając ją na bok.

ZAKŁADANIE – Umieścić wilgotną soczewkę kontaktową w płytkim zagłębieniu, znajdującym się na węższym końcu uchwyty przyssawki. Wilgotna soczewka przylgnie do przyssawki w tej pozycji. Przyłożyć soczewkę do powierzchni oka.

CZYSZCZENIE – Przyssawkę DMV 45 należy często myć ciepłą wodą z mydłem. Pozostawić do wyschnięcia. Po wyschnięciu, przechowywać przyssawkę w dostarczonym pojemniku.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI – Jeżeli przyssawka DMV 45 przypadkowo przylgnie do powierzchni oka, należy przesunąć ją w kierunku kącika oka i zdjąć ją ruchem obracającym.

OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo zadławienia. Przechowywać przyssawkę i inne wyroby medyczne w miejscu niedostępnym dla dzieci.

NIE STOSOWAĆ przyssawki w przypadku chorób lub urazu oka.

Przyssawka jest wykonana z kuczuku naturalnego, zawierającego suchy lateks. Dotychczas nie zgłoszono przypadków uczulenia na lateks wywołanego przez ten składnik.

Należy zawsze przestrzegać zaleceń udzielonych przez specjalistę kontaktologa.

NIE STOSOWAĆ PRZYSSAWKI DO MIĘKKKICH SOCZEWEK KONTAKTOWYCH.



Dystrybucja w Europie:
Prolens AG, Josefstasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio - USA

© 2017 DMV Corporation
www.dmvcorp.com



Emergo Europe Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague
The Netherlands

Dystrybucja w Polsce:

AQUA·LENS®
SZYMANEK S.C.

tel./fax: 22 831-32-40
aqualens@soczewki.biz