



DMV® CLASSIC™ DO SZTYWNYCH I GAZOPRZEPUSZCZALNYCH SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

ZDEJMOWANIE – Zwilżyć przyssawkę. Ściskając uchwyt przyssawki Classic, ustawić jej końcówkę nad środkową częścią soczewki kontaktowej. Przyłożyć przyssawkę do przedniej powierzchni soczewki. Trzymając przyssawkę Classic przyłożoną do powierzchni soczewki, lekko zmniejszyć nacisk na uchwyt, co spowoduje przylgnięcie przyssawki do soczewki. Patrząc w lustro, zdjąć soczewkę z powierzchni oka ruchem odciągającym. Po zdjęciu soczewki, należy ponownie ścisnąć uchwyt, co spowoduje uwolnienie soczewki przez miseczkę przyssawki.

ZAKŁADANIE – Umieścić zwilżoną soczewkę kontaktową na przyssawce, nie ściskając uchwytu. Soczewka przylgnie do miseczki przyssawki. Umieścić soczewkę kontaktową na powierzchni oka.

NIE NALEŻY ścisnąć uchwytu przyssawki podczas zakładania soczewki.

CZYSZCZENIE – Przyssawkę Classic należy często myć ciepłą wodą z mydłem. Pozostawić do wyschnięcia. Po wyschnięciu, przechowywać przyssawkę w dostarczonym pojemniku.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI – Jeżeli przyssawka Classic przypadkowo przylgnie do powierzchni oka, należy ścisnąć uchwyt, aby oddzielić miseczkę przyssawki od oka i zdjąć ją.

OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo zadławienia. Przechowywać przyssawkę i inne wyroby medyczne w miejscu niedostępnym dla dzieci.

NIE STOSOWAĆ przyssawki w przypadku chorób lub urazu oka. Przyssawka jest wykonana z kuczuku naturalnego, zawierającego suchy lateks. Dotychczas nie zgłoszono przypadków uczulenia na lateks wywołanego przez ten składnik.

Należy zawsze przestrzegać zaleceń udzielonych przez specjalistę kontaktologa.



Dystrybucja w Europie:
Prolens AG, Josefstasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio - USA

DMV Corporation
www.dmvcorp.com



Emergo Europe Prinessegracht 20
2514 AP, The Hague
The Netherlands

Dystrybucja w Polsce:

AQUA·LENS®
SZYMANEK S.C.

tel./fax: 22 831-32-40
aqualens@soczewki.biz