

# Regard<sup>®</sup>



## Spojrzenie w przyszłość



■ Innowacyjny roztwór do pielęgnacji soczewek kontaktowych

# Regard®

**Innowacyjny,  
uwalniający tlen preparat  
do dezynfekcji  
i przechowywania  
miękkich soczewek  
kontaktowych.**

## **Rewolucyjny skład.**

Wyjątkowa formuła preparatu Regard® zawierająca OxyChlorite® zwiększa higienę stosowania soczewek kontaktowych i uwalnia tlen, poprawiając komfort noszenia. Regularne stosowanie preparatu pozwala ograniczyć powstawanie białkowych osadów na soczewkach kontaktowych. Regard idealnie nadaje się do skutecznego dezynfekowania pojemnika na soczewki kontaktowe, zapewniając jednocześnie oczom maksymalny komfort.



## **■ Czyszczenie**

- Bardzo wydajny proces dezynfekcji.
- Eliminuje drobnoustroje, razem z ich enzymami i toksynami.
- Usuwa osady białkowe.

## **■ Komfort**

- Po rozpadzie substancji czynnych pozostają woda, sól i tlen.
- Skuteczny składnik zwilżający i zwiększający komfort (HPMC 0,15%).

## **■ Zdrowie**

- Formuła uwalniająca tlen.
- Nie zawiera toksycznych konserwantów.



# Regard<sup>®</sup>

## Spojrzenie na soczewki kontaktowe z perspektywy oka



Działanie dezynfekujące preparatu Regard opiera się na wytwarzaniu ditlenku chloru, który działa przeciwbakteryjnie, niszcząc elementy komórkowe drobnoustrojów, toksyny i enzymy. Cząsteczka OxyChlorite<sup>®</sup> samoczynnie stabilizuje się w roztworze i ulega ponownej konwersji po dezynfekcji.

### W pojemniku na soczewki kontaktowe:



Poza pojemnikiem, resztki roztworu pozostałe na powierzchni soczewki kontaktowej są niestabilne i rozpadają się tworząc na powierzchni oka roztwór soli fizjologicznej oraz uwalniając tlen.


### Na powierzchni oka:



## Przebadany klinicznie

### Bezwzględna częstość występowania ocen

Łącznie (nowi i dotychczasowi użytkownicy soczewek)

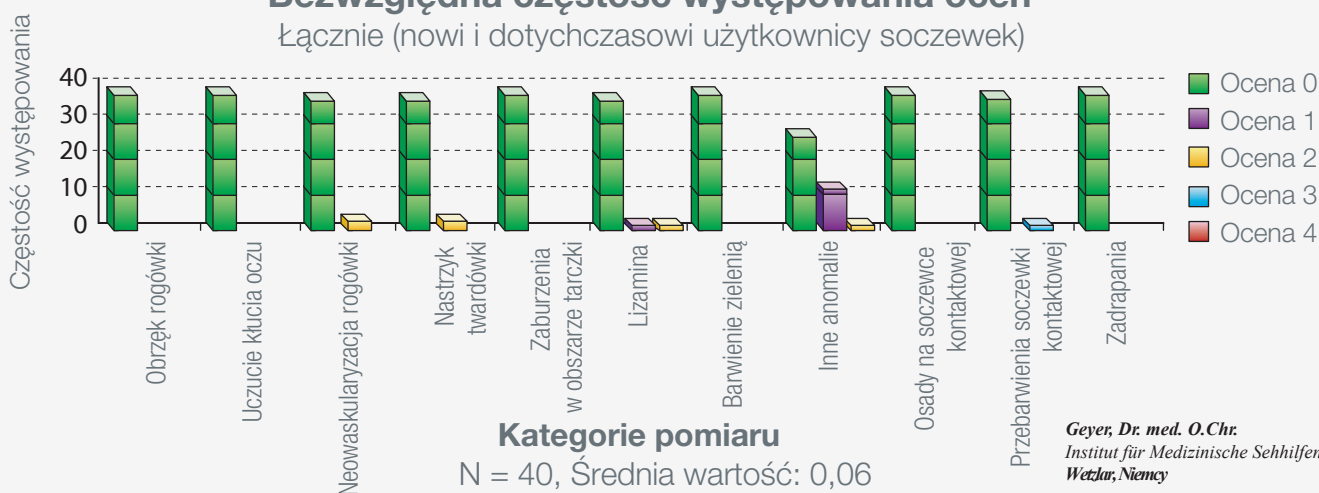

**Bez konserwantów po założeniu soczewki**

Nowa opatentowana formuła preparatu Regard zawierająca OxyChlorite jest łatwa w stosowaniu – jedno opakowanie roztworu i jeden etap do wykonania. Nie zawiera potencjalnie drażniących lub toksycznych konserwantów. Preparat jest szczególnie wskazany do stosowania do oczu wrażliwych i przy niskiej jakości filmu łzowego.

	Preparaty na bazie nadtlenukw	Roztwory uniwersalne	Regard®
Nie zawiera konserwantw	Tak	Nie	<b>Tak</b>
Można stosować bezpośrednio do oka	Nie	Tak	<b>Tak</b>
Zawiera składinik czyszczący	Nie	Tak	<b>Tak</b>
Aktywnie odciąga białka od soczewki kontaktowej	Nie	Nie	<b>Tak</b>
Zawiera składinik nawilżający	Nie	Czasami	<b>Tak</b>
Przedłuża komfort noszenia soczewek	Nie	Nie	<b>Tak</b>
Przeznaczony do silikonowo-hydro- żelowych soczewek kontaktowych	Tak	Nie	<b>Tak</b>



Dystrybutor:

**AQUA-LENS®**  
SZYMANIEK S.C.

ul. Taborowa 18, 02-699 Warszawa  
tel.: 22 831 32 40, 512 655 125  
e-mail: aqualens@soczewki.biz, www.soczewki.biz