

**Dla wszystkich osób
noszących soczewki RGP**

Tylko MeniCare Plus i Progent



Czyszczenie
Dezynfekcja
Przechowywanie
Płukanie
Zwilżanie

Przy codziennym noszeniu
wystarczy 5 minut
stosowania uniwersalnego
płynu MeniCare Plus

Skuteczność wobec
Acanthamoeba
(cysty i trofozoity)
w ciągu 2 godzin*



Aby zapewnić maksymalny komfort noszenia soczewek RGP

Hypromeloza

Środek zwilżający i nawilżający, wytwarzający ochronną warstwę na powierzchni

Opakowanie:

- MeniCare Plus 250 ml (zawiera pojemnik na soczewki RGP)
- Zestaw : MeniCare plus 50 ml, pojemnik na soczewki RGP, 1 dawka Progent A/B, pojemnik Progent

Skład:

- biguanid poliheksametylenowy 0,0005 %
- poloksamer 0,5 %
- hypromeloza 0,275%
- alkohol wielowodorotlenowy, EDTA, substancje pomocnicze 100 ml

CE 0483 Wytwórca: Menicon Pharma 67400 Illkirch – Graffenstaden Francja

* (Wydział Mikrobiologii i Immunologii Leicester, Wielka Brytania)



Dystrybutor: **AQUA-LENS®**
SZYMANEK S.C.

ul. Taborowa 18, 02-699 Warszawa, tel. 22 831 32 40, aqualens@soczewki.biz, www.soczewki.biz

*Dla wszystkich osób
noszących soczewki RGP*

Tylko MeniCare Plus i Progent

**Usuwanie osadów białkowych, dezynfekcja
i intensywne czyszczenie
nadaje się do wszystkich soczewek
kontaktowych RGP**



- Stosowanie raz na tydzień w przypadku soczewek RGP noszonych w trybie dziennym
- Po zdjęciu soczewek RGP do ciągłego noszenia (7 dni do 30 dni...)



Jak stosować preparat Progent (proszę uważnie zapoznać się z instrukcją)

- Zmieszać dawkę A i B w pojemniku Progent
- Zanurzyć soczewki w płynie na 30 minut (zanurzenie w płynie na czas dłuższy niż 30 minut może spowodować odbarwienia soczewek)
- Dokładnie płukać soczewki i pojemnik płynem MeniCare Plus przez co najmniej 15 sekund

Progent wykazał niezwykłą skuteczność wobec bakterii, grzybów, wirusów i Acanthamoeba* w ciągu zaledwie 5 minut i wobec prionów w ciągu 30 minut**

Opakowanie:

Menicon Progent 5 zastosowań (po 5dawkach preparatu Progent A i B, 1 pojemnik Progent)
Zestaw: po 1 dawce preparatu Progent A i B, 1 pojemnik Progent,
1x50 ml płynu MeniCare plus, 1 dwustronny pojemnik na soczewki RGP

Skład:

dawka A / Podchloryn sodu
dawka B / Bromek potasu

CE 0483 Wytwórca: Menicon Pharma, 67400 Illkirch – Graffenstaden, Francja

* patrz testy dezynfekcji:

Skuteczność przeciwwirusowa (Medical University Nancy MDT, nr ref.: CEN / TC 216 / N 98, AFNOR NFT 72 -180)

Aktywność przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza (MENICON PHARMA, nr ref.: ISO / CD 14729 Stand alone test),

Aktywność przeciw Acanthamoeba (Bactériology institute, Strasbourg medical University ; Menicon co., Ltd / Wydział mikrobiologii i immunologii, Leicester, Wielka Brytania).

** patrz aktywność przeciw prionom (raport nr 277111 z czerwca 2002 r., C.E.A. / SPI BIO / MENICON) z procedurą stosowania eliminującą priony.



Dystrybutor: **AQUA-LENS®**
SZYMANEK S.C.

ul. Taborowa 18, 02-699 Warszawa, tel. 22 831 32 40, aqualens@soczewki.biz, www.soczewki.biz